

Souprava pro detekci antigenu nového koronaviru (kolloidní zlato)

Přibalová informace

Kat: COVID-19-NG02 **Vzorky:** sputum
Verze: 05 **Platnost od:** 15/01/2021

Pouze pro účely odborné diagnostiky in vitro.

NÁZEV PRODUKTU

Souprava pro detekci antigenu nového koronaviru (kolloidní zlato)

BALENÍ

1ks, testovací sada

ÚČEL POUŽITÍ

Produkt slouží ke kvalitativní detekci nového koronaviru ve vzorcích sputa. Představuje pomůcku v diagnostice infekce novým koronavirem.

SOUHRN

Nový koronavirus spadá do rodu β . COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. Lidé jsou obecně citliví. V současnosti jsou hlavním zdrojem nákazy novým koronavirem pacienti, kteří jsou tímto virem nakaženi; zdrojem nákazy mohou být i asymptomaticky nakažené osoby. Podle soudasných epidemiologických znalostí je inkubační doba 1–14 dní, obvyklá doba je 3–7 dní. Hlavními projevy onemocnění jsou horečka, únava a suchý kašel, někdy se přidružuje ucpaný nos, rýma, bolest v krku, svalová bolest a průjem.

PRINCIP TESTU

Souprava pro detekci antigenu nového koronaviru (kolloidní zlato) funguje na principu imunochromatografické membrány s vysoce citlivými monoklonálními protilátkami sloužící k detekci nukleokapsidového proteinu viru SARS-CoV-2 ve výtěru z krku. Zkušební proužek sestává z těchto součástí: podložka na vzorek, reagenční podložka, reakční membrána a absorpční podložka. Reagenční podložka obsahuje kolloidní zlato konjugované s monoklonální protilátkou proti nukleokapsidovému proteinu viru SARS-CoV-2, reakční membrána obsahuje sekundární protilátku proti nukleokapsidovému proteinu viru SARS-CoV-2. Celý proužek je zafixován v plastovém pouzdře. Když se do jamky pro vzorek přikápnou vzorek, vysušený konjugát na reagenční podložce se rozpustí a společně se vzorkem migruje.

Pokud je ve vzorku přítomný antigen viru SARS-CoV-2, vytvoří se mezi anti-SARS-2 konjugátem a virem komplex, který se zachytí na monoklonálních protilátkách, jimiž je potažena testovací oblast (T). Pokud není čárka T přítomná, poukazuje to na negativní výsledek. Jako kontrola správnosti postupu slouží červená čárka, která se objevuje v kontrolní oblasti (C) vždy a dokládá, že byl nadávkován správný objem vzorku a že je membrána nasáklá.

SLOŽENÍ TESTOVACÍ SADY

- Zkušební kazeta pro jednorázové použití
- Zkumavka k extrakci vzorku
- Víčko s otvorem pro uzavření extrakční zkumavky
- Plastová pipeta na přenesení vzorku
- Papírový kelímek pro jednorázové použití

UCHOVÁVÁNÍ A STABILITA


Soupravu uchovávejte v původním vzduchotěsně uzavřeném sáčku za teploty v rozmezí 2–30 °C mimo přímý dopad slunečních paprsků. Souprava je stabilní po celou dobu použitelnosti uvedenou na štítku.

Po otevření vzduchotěsně uzavřeného sáčku je třeba soupravu použít během jedné hodiny. Kdyby byla souprava vystavena po delší dobu vysokým teplotám a vlhkému prostředí, znehodnotila by se. Číslo šarže a doba použitelnosti jsou uvedeny na štítku.

ZKUŠEBNÍ POSTUP


Před vlastním testem nechte zkušební soupravu i vzorky vyteperovat na pokojovou teplotu (15–30 °C).

POSTUP ODBĚRU VZORKU

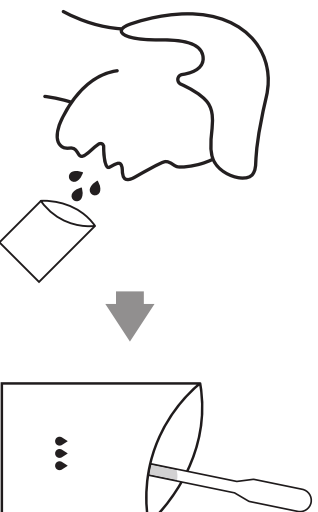


1) Do přítomného jednorázového papírového kelímku proveďte sběr slin, sputa nebo kombinaci obojího. Pokud je to možné, hlubokým zakašláním odeberte hlen a divněte přímo do kelímku. Pipetou odeberte vzorek sputa v množství 10–50 mg (velikosti odpovídá zhruba hlavice zápalky).

POSTUP DETEKCE

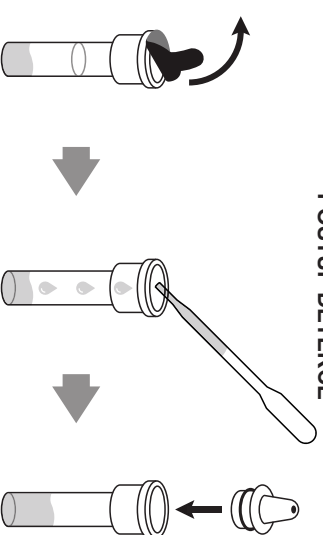

2) Odlepte krycí víčko extrakční zkumavky a pipetou přeneste 3 kapky sputa a slin do rozložku. Extrakční zkumavku uzavřete víčkem. Cvrnkáním do spodní části zkumavky zajistíte, aby se vzorek dokonale promísil.

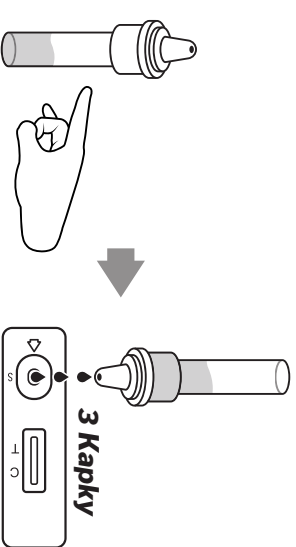

3) Z obalového sáčku vyjměte zkušební kartu, položte ji na vodorovnou plochu, a ze vislé polohy nadávkujte do otvoru S, 3 kapky roztoku vzorku.

4) Po 15 minutách odečtete výsledek. Po 30 minutách se již výsledek považuje za nepřesný a neplatný.

VÝSLEDEK INTERPRETACE

Pozitivní (+): Za 15 minut je vidět jak čárka T, tak čárka C. Negativní (-): 15 minut po nakažení vzorku je vidět čárka C, ale nikoli čárka T.

Neplatný: Pokud se čárka C neobjeví, je výsledek testu neplatný a vzorek je třeba otestovat znovu s jinou zkušební kartou.



UPOZORNĚNÍ

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PŘEVEDENÍ TESTOVÁNÍ

K vyšetření antigenním rapid testem Newgene se používá vzorek slin nebo sputa (hlenu).

Sliny je doporučeno sbírat ráno před čištěním zubů a snídaní. Ústa před odebráním vzorku nevyplachujte.

Pokud jsou sliny odebrány v průběhu dne, je potřeba počkat alespoň 30 minut po jídle nebo pití.

Vhodná diagnostická doba pro testování je od 1. do 5. dne od propuknutí příznaků.

PŘED ODBĚREM

- Nečistěte si zuby ani jazyk
- Nejezte a nepijte alespoň 30 minut
- Nekonzumujte alkoholické nápoje
- Nekurte

V případě porušení doporučených pokynů k testování, může být výsledek nepřesný.

Testovací soupravu je možné použít pro pravidelný screening (např. na pracovišti) pro včasné zachycení a izolaci pozitivních osob nebo pro otestování po kontaktu s pozitivně testovanou osobou (ideálně od 3. dne po kontaktu) nebo v případě příznaků respiračního onemocnění.

POZNÁMKY

Souprava pro detekci antigenu nového koronaviru (koloidní zlato) je určena pro testování vzorků sputa. Vzorky krve, séra, plazmy, moči aj. mohou poskytovat abnormální výsledky.

Dbějte, abyste k testu použili správné množství vzorku; příliš malé nebo příliš velké množství vzorku může způsobit odchylku výsledku.










Vzorek lze hodnotit jako pozitivní v okamžiku, kdy se objeví jak čárka T, tak čárka C. To může trvat 3–15 minut od nadávkování vzorku. K hodnocení vzorku jako negativního počkejte po nadávkování vzorku 15 minut. Po 30 minutách od nadávkování vzorku je již výsledek neplatný.

Produkt slouží k jednorázovému použití; nerecyklujte jej.

Použitý produkt, vzorky i další spotřební materiál zlikvidujte podle platných předpisů jako zdravotnický odpad.

Pokud zkušební nebo kontrolní čárka leží mimo příslušné okénko, je výsledek neplatný. Zkušební kartu zlikvidujte a použijte novou.

SYMBOLIKA PIKTOGRAMŮ

	Předčte si návod k použití		Počet testů v soupravě		Pověření Zástupce
	Pouze pro účely diagnostiky in vitro		Spotřebuje do		Neponožte/vejte opakované
	Uchovávejte při teplotě 2–30 °C		Číslo šarže		Katalogové číslo



New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd.
Room 1606, Floor 16, Building 5, 688 Bin'an Road, Chaghe Street,
Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, P. R. China



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands